


PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

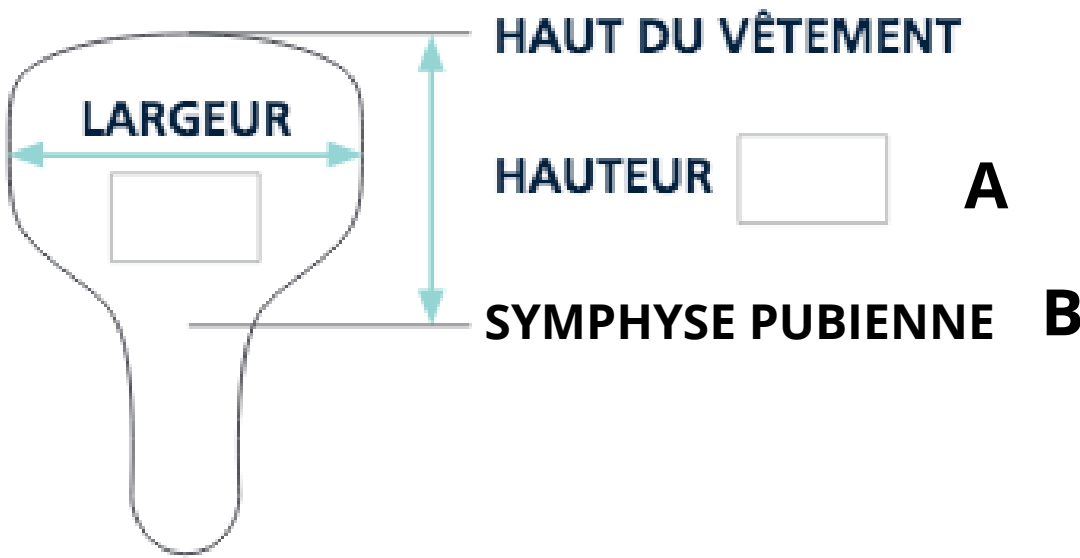

- 1 - Tracez un repère au niveau de la symphyse pubienne **B** (située au niveau de la partie supérieure du pubis, partie osseuse dure), puis à la hauteur souhaitée **A** de manière à couvrir la partie à drainer.
- 2 - Mesurez la largeur souhaitée de manière à couvrir la zone à drainer.
- 3 - Mesurez la hauteur du repère **A** au repère **B**.
- 4 - Faites correspondre la largeur et la hauteur au tableau ci-dessous pour déterminer votre taille.

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE
LARGEUR	28	32	36	40
HAUTEUR	32	35	38	41

- 5 - Reportez la taille ainsi que la quantité et validez votre commande.